



FICHE TECHNIQUE

MASQUE DE PROTECTION MASQUE «Type chirurgical» HORS USAGE MÉDICAL

Nom : Masque de protection respirant et jetable.

Efficacité de filtration: taux de filtration des particules non grasses > = 95%

Stockage : il est préconisé de conserver les masques entre -20° à +30°, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instruction:

Pour commencer , il est indispensable de se laver les mains avant de prendre le masque.

1. Passer les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles.
2. Assurez vous que le masque couvre bien le menton.
3. Après usage, retirer le masque par les élastiques.

Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.

Après le retrait, il est indispensable de se laver les mains.

Utilisation maximale : 4 Heures.

Excellente protection pour la respiration.

Convient pour l'artisanat, l'industrie, le commerce, le jardinage, la poussière, le Pollen...

Fabrication en matériaux non tissé, très confortable.

Fonctions:



Anti-Pollution



Anti-éclaboussure



Anti-buée



Couleur :Blanc

Type de public : Adulte

Usage : Unique

Référence: MASCHIR



3 760279 349305

