



FICHE TECHNIQUE

MASQUE DE PROTECTION HORS USAGE MÉDICAL

Nom : Masque de protection KN95 / FFP2

Efficacité de filtration: taux de filtration des particules non grasses > = 95%

Stockage : il est préconisé de conserver les masques entre -20° à +30°, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

CONFORME NORME NF EN 149 / 2001 + A1 / 2009

Instruction:

Pour commencer , il est indispensable de se laver les mains avant de prendre le masque.

1. Repérer le haut avec la barrette nasale.
2. Passer les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles.
3. Assurez vous que le masque couvre bien le menton.
4. Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez.
5. Après usage, retirer le masque par les élastiques.

Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.

Après le retrait, il est indispensable de se laver les mains.

Utilisation maximale : 4 Heures.

Fonctions:



Anti-bactériens



Anti-gouttelette



Anti-Pollution



Couleur :Blanc

Type de public : Adulte

Usage : Unique

Référence: MASFFP2



3 760279 349299

